

TROUBLESHOOTING ABTEST CARD®


Résultats

Les résultats positifs doivent présenter une surface positive **homogène** à l'endroit de dépôt du sang. Les résultats sont lus comme négatifs lorsque le résultat présente une couleur verte à translucide homogène. Il est possible que quelques traces de sang subsistent au lavage mais le résultat ne peut pas être considéré comme un faux positif sauf si la trace laissée est rosée et homogène à l'endroit de dépôt du sang. Dans ce cas, il est recommandé de refaire un test.



Exemples de lecture de résultats

Résultats positifs

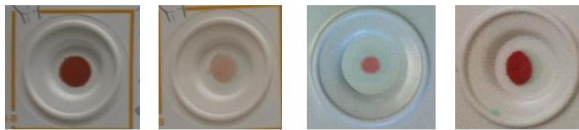

Résultats négatifs



Recommandations

Hydratation :

- Bien hydrater les zones réactives, jusqu'à ce que leurs couleurs respectives soient lavées.
- Ne pas hésiter à réhydrater la zone réactive dédiée au culot juste avant le dépôt de la goutte de la tubulure dans le cas où le dépôt du sang du doigt du patient a pris du temps.
- Attendre la pénétration complète de la solution de lavage avant le dépôt du sang.

Dépôt du sang :

- La tubulure doit être bien homogénéisée afin que les globules rouges en suspension soient correctement répartis dans le sérum.

Lavage :

- Il est impératif que le sang déposé soit complètement absorbé avant de laver la zone réactive.
- En cas de doute ou de traces sur le résultat négatif, un second lavage est recommandé.